

GEBRAUCHSANWEISUNG

HISTAMIN TEST



BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Analytik.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie diese für die Probennahme bereit.

Flachspül-Toilette & Tiefspül-Toilette:

Bitte beiliegende „Stuhlauffanghilfe“ (Patientenhilfe für die Entnahme der Stuhlprobe) benutzen. Probe bis zum Versand im Kühlschrank bei 2-8 C° aufbewahren, jedoch nicht einfrieren!

Die Untersuchung von Histamin im Stuhl dient der Abklärung einer Unverträglichkeit, die möglicherweise durch Histamin ausgelöst worden ist. Diese kann entstehen, wenn nach dem Genuss von histaminreichen Nahrungsmitteln, durch Fäulnisprozesse im Darm oder durch übermäßige Ausschüttung aus den Darmmastozyten hohe Mengen an Histamin angeschwemmt werden.

Die Probennahme sollte daher nicht im Rahmen einer histaminfreien bzw. histaminarmen Ernährung durchgeführt werden, da ansonsten falsch-normale Laborergebnisse zu erwarten sind. Unter der Voraussetzung, dass bei Ihnen bisher noch keine akuten Histaminreaktionen wie z. B. Herzrasen, Kreislaufstörungen, Schwindel, Übelkeit/Erbrechen oder Atemnot aufgetreten sind, können am Vorabend Nahrungsmittel bzw. Getränke bevorzugt werden, die in Verdacht stehen, bei Ihnen eine Histaminreaktion auszulösen.

Notieren Sie daher auf dem beiliegenden Protokoll bitte alle Nahrungsmittel, die Sie am Vortag zu sich genommen haben bzw. die in Verdacht stehen, bei Ihnen eine Histaminreaktion auszulösen. Vergessen Sie nicht die Uhrzeit der Einnahme anzugeben. Eine Übersicht über histaminreiche Nahrungsmittel finden Sie auf der Rückseite dieser Information.

Bitte geben Sie auch die Einnahme von Medikamenten, z. B. Aminosäure-Präparate, auf dem Protokoll an. Probiotika sollten eine Woche vor Probennahme ausgesetzt werden.

Wichtiger Hinweis für Frauen:

Bitte nehmen Sie keine Probe während Ihrer Periode.

Schritt 2: **VORBEREITUNG**

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3: **DURCHFÜHRUNG**

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4: **PROBENVERSAND**

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein



1 Histamin-Probenröhrchen
mit Etikett in Versandgefäß



1 Stuhlfänger



1 Versandtasche



ACHTUNG!

*Die Stabilisatorflüssigkeit im
blau-grünen Histaminprobenröhrchen
NICHT ausschütten!*


Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie den Abschnitt „Wichtige Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis der Probe gewährleistet werden.



01

Platzieren Sie den Stuhlfänger gemäß Anleitung in Ihrer Toilette.

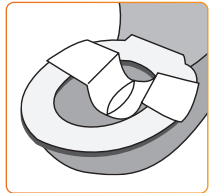



02

Nehmen Sie das Histamin-Probenröhrchen und das Etikett aus der Umverpackung. Beschriften Sie zunächst das Etikett mit Namen und Probendatum. Kleben Sie dieses anschließend auf das Probenröhrchen.

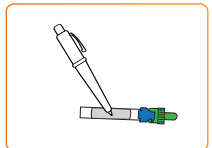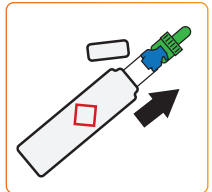


03

Öffnen Sie nun das Probenröhrchen: Halten Sie hierzu das transparente Röhrchen mit der einen Hand sowie den darüber liegenden blauen Adapter mit Daumen und Zeigefinger derselben Hand fest. Drehen Sie mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den grünen Stick gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den grünen Entnahmestab heraus. **Der blaue Adapter darf nicht abgeschraubt werden!**

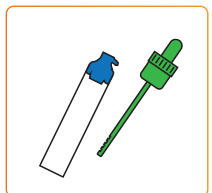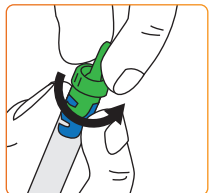


04

Stechen Sie mit der Spitze des grünen Sticks **an drei verschiedenen Stellen in die Stuhlprobe**. Achten Sie darauf, dass nur die Rillen der Spitze vollständig mit Stuhl befüllt sind.

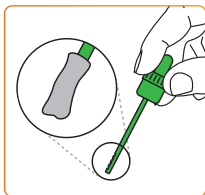


05

Stecken Sie den mit der Stuhlprobe benetzten Entnahmestab durch den blauen Adapter in das transparente Röhrchen, um überflüssiges Material abzustreichen.

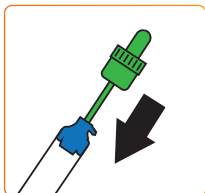

06


Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis dieser im blauen Adapter einrastet. Durch das Einrasten wird das Auslaufen der Pufferlösung verhindert.

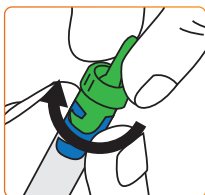

07

Stecken Sie das Probenröhrchen in das Versandgefäß und verschließen Sie dieses sorgfältig.

Bekleben Sie das Versandgefäß mit einem Etikett, das einen achtstelligen Barcode trägt. Sie finden die Etiketten auf dem Probenbegleitschein.

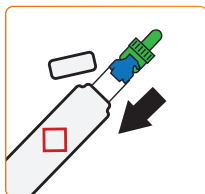

Schritt 4:

PROBENVERSAND

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst aktivieren.

01

Im unteren Bereich des **Probenbegleitscheins** befindet sich ein Kundenabschnitt mit dem benötigten QR-Code. Scannen Sie den Code, um direkt auf die Eingabemaske des Kundenportals zu gelangen. Hier aktivieren Sie Ihren Test mittels Eingabe Ihrer persönlichen Daten. Haben Sie alle Felder vollständig ausgefüllt, bestätigen Sie die Testaktivierung mit „Daten senden“. Trennen Sie nun den **Kundenabschnitt** ab und bewahren diesen sorgfältig auf. Mit der darauf abgebildeten Seriennummer sowie Ihrem persönlichen Code können Sie nach der Probenauswertung Ihren Befund online abrufen.

02

Zum Versand geben Sie **das Versandgefäß (inkl. des Probenmaterials darin) mit dem Probenbegleitschein***

in die beiliegende Versandtasche. Wenn alle Materialien in die Versandtasche gegeben sind, ziehen Sie den

Schutzstreifen der Versandtasche ab und kleben

Sie diese zu. **Achtung! Die Versandtasche lässt**

sich danach nicht mehr öffnen. Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.



Senden Sie nur vollzählige Probengefäße an das Labor. Beachten Sie die ggf. geforderte Mindestmenge an Probenmaterial, da eine Laboranalyse sonst nicht möglich ist.

* Füllen Sie den Probenbegleitschein komplett aus, wenn Sie den Test nicht online aktiviert haben. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall die Bereitstellung der Ergebnisse 1-2 Tage länger dauern kann.



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen

Hinweise zur Befundabfrage

Probenbegleitschein: Feld „Einsender-Etikett“

Das Feld „Einsender-Etikett“ wird auf dem Probenbegleitschein nur dann ausgefüllt, wenn Sie durch eine Praxis betreut werden.

Probenbegleitschein / Download Ihres Befunds

Sind auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite.

www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codenummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem Probenbegleitschein oder auf der Banderole. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Senden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.



Befundabfrage

Geburtsdatum

 ▾ ▾ ▾

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung

	Hersteller
	Katalognummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis (MM.JJJJ)
	Nicht wiederverwenden
	Trocken aufbewahren
	Temperaturgrenzwerte
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen
	Achtung
	Mengenangabe der Verpackungseinheit
	Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen
	Kann im Hausmüll entsorgt werden
	Unsteril
	Es liegen Referenzwerte für alle Geschlechter und Altersklassen vor.
	Achtung: Gesundheitsgefährdend

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probennahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Laboranalyse von Histamin im Stuhl zur Bestimmung der intestinalen Histaminmenge.

PROBENNAHME

 **STUHL**



Indikationen: Kopfschmerzen, Hautausschläge, Magen-Darm-Probleme, Atembeschwerden, Kreislaufbeschwerden

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die medivere GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung Überprüfung und Validierung vorgenommen wurden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 109, 55128 Mainz
www.medivere.de

REF

210003DE

QTY 1

