

GEBRAUCHSANWEISUNG

SÄURE-BASEN-TEST NACH SANDER



BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Analytik.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

Wählen Sie für die Urinprobensammlung einen Tag, an dem Sie die folgenden Bedingungen erfüllen können:

Probe	Uhrzeit	wichtige Ernährungshinweise
1	6 Uhr	direkt danach Frühstück einnehmen
2	9 Uhr	bitte keine Zwischenmalzeit einnehmen
3	12 Uhr	Mittagessen nach der 3. Probe einnehmen
4	15 Uhr	bitte keine Zwischenmalzeit einnehmen
5	18 Uhr	danach Ernährung wie gewohnt fortsetzen

- Bitte notieren Sie auf dem Testprotokoll, was Sie am Tag der Probennahme sowie am Vortag verzehrt haben.
- Nehmen Sie am Testtag und an den beiden Vortagen keine Basensalze (Alkala, Bullrich's Vital o.ä.) oder mineralstoffreiche Nahrungsergänzungsmittel ein.
- Senden Sie nur vollzählige Probengefäße an das Labor. Beachten Sie die ggf. geforderte Mindestmenge an Probenmaterial, da eine Laboranalyse sonst nicht möglich ist.
- Bitte prüfen Sie nach der Probennahme den korrekten Zustand und festen Verschluss sämtlicher Gefäße.

Schritt 2:

VORBEREITUNG

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4:

PROBENVERSAND

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein



1 Testprotokoll für Ihre
Angaben zur Uringewinnung
und Ernährungsgewohnheiten



1 Urinbecher



5 Urinröhrchen in
5 Versandgefäßen
(Urinaußenröhrchen)



5 Etiketten mit der Aufschrift
Probe 1-5

Probe 1

Datum:

Uhrzeit:

Name:

1 Versandtasche



Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie alle „wichtigen Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis gewährleistet werden.

Die Blase sollte vollständig entleert werden! Falls Sie nur wenig Wasser lassen können, trinken Sie bitte nach jeder Probe ein Glas Wasser, damit das Wasserlassen zum nächsten Zeitpunkt funktioniert.

01

Nehmen Sie die 5 Urinproben zu folgenden Uhrzeiten:

- **6 Uhr** (darauf Frühstück)
- **9 Uhr**
- **12 Uhr** (darauf Mittagessen)
- **15 Uhr**
- **18 Uhr**



02

Benutzen Sie für die Urin-gewinnung den beige-fügten Becher und füllen diesen ungefähr bis zur Hälfte.




03

Füllen Sie den Urin aus dem Becher vorsichtig in das erste Probenröhrchen bis zur oberen Markierung „25 ml“ um und verschließen Sie es fest.




04

Verschließen Sie das Urin-röhrchen sorgfältig und schwenken Sie es 2–3mal über Kopf.

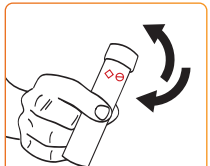

05

Beschriften Sie das Etikett (Probe 1) und kleben Sie dieses auf das gefüllte Urinröhrchen.

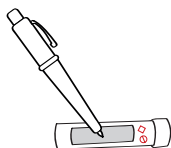


06

Bitte folgen Sie bei der Gewinnung der weiteren Urinproben wie in den Punkten 1 bis 4 beschrieben. Füllen Sie für jedes Urinröhrchen das dazugehörige Etikett (Probe 2-5) aus und kleben Sie dieses auf das gefüllte entsprechende Probenröhrchen.

07


Überprüfen Sie bitte noch einmal, ob alle Röhrchen fest verschlossen sind und das Testprotokoll vollständig ausgefüllt ist.

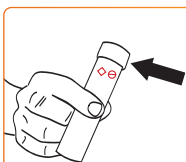

08

Stecken Sie die 5 Probenröhrchen in die mitgelieferten Versandgefäße.
Verschließen Sie den Schraubverschluss der Versandgefäße sehr sorgfältig.

Bewahren Sie die Proben bis zum Versand am darauffolgenden Tag im Kühlschrank bei 2-8°C auf.

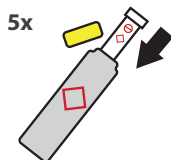

09

Bekleben Sie das Versandgefäß mit einem Etikett, das einen achtstelligen Barcode trägt. Sie finden die Etiketten auf dem Probenbegleitschein.

Schritt 4:

PROBENVERSAND

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst aktivieren.

01

Im unteren Bereich des **Probenbegleitscheins** befindet sich ein Kundenabschnitt mit dem benötigten QR-Code. Scannen Sie den Code, um direkt auf die Eingabemaske des Kundenportals zu gelangen. Hier aktivieren Sie Ihren Test mittels Eingabe Ihrer persönlichen Daten. Haben Sie alle Felder vollständig ausgefüllt, bestätigen Sie die Testaktivierung mit „Daten senden“. Trennen Sie nun den **Kundenabschnitt** ab und bewahren diesen sorgfältig auf. Mit der darauf abgebildeten Seriennummer sowie Ihrem persönlichen Code können Sie nach der Probenauswertung Ihren Befund online abrufen.

02

Zum Versand geben Sie das **Versandgefäß (inkl. Probenmaterial)** mit dem **Probenbegleitschein*** in die beiliegende Versandtasche. Wenn alle Materialien in die Versandtasche gegeben sind, ziehen Sie den Schutzstreifen der Versandtasche ab und kleben Sie diese zu. **Achtung! Die Versandtasche lässt sich danach nicht mehr öffnen.** Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.



Senden Sie nur vollzählige Probengefäße an das Labor. Beachten Sie die ggf. geforderte Mindestmenge an Probenmaterial, da eine Laboranalyse sonst nicht möglich ist.

* Füllen Sie den Probenbegleitschein komplett aus, wenn Sie den Test nicht online aktiviert haben. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall die Bereitstellung der Ergebnisse 1-2 Tage länger dauern kann.



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen

Hinweise zur Befundabfrage

Probenbegleitschein: Feld „Einsender-Etikett“

Das Feld „Einsender-Etikett“ wird auf dem Probenbegleitschein nur dann ausgefüllt, wenn Sie durch eine Praxis betreut werden.

Probenbegleitschein / Download Ihres Befunds

Sind auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite.

www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codenummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem Probenbegleitschein oder auf der Banderole. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Senden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.



Befundabfrage

Geburtsdatum

 ▾ ▾ ▾

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung

	Hersteller / Zusammensteller
	Referenznummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer
	Verwendbar bis (JJJJMM)
	Nicht wiederverwenden
	Trocken aufbewahren
	Temperaturbereich
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Vor Sonnenlicht schützen
	Warnhinweis beachten
	Mengenangabe der Verpackungseinheit

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probenentnahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenloses Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Bestimmung des Säure-Basen-Haushaltes nach Dr. Friedrich F. Sander im Tagesprofil.

PROBENNAHME

 URIN



Indikationen: Ermittlung der Pufferkapazität des Urins, um Hinweise auf die Basenreserven des Organismus zu erhalten.

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die medivere GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung überprüft und validiert wurden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 109
55128 Mainz
www.medivere.de



310005DE



1

